

No	Örnek	Talimatlar
1	Kan (EDTA'lı tüpe)	Kısa sürede, soğuk zincir altında (+4°C) her hangi bir manipulasyon yapılmadan gönderilmelidir.
2	Kan (Silikonlu Tüpe)	Serum ayrılmadan da gönderilebilir. Santrifüj edilen örnekler, serum ayrıldıktan sonra eğilerek steril plastik bir tüpe aktarılır. Hemoliz olmaması için kan alındıktan sonra pıhtılaşmaya kadar tüpler sallanmalı ve çalkalanmamalıdır.
3	Organ numunesi	Teşhis amacıyla taze dokulardan tüm fötüs yada fötüsa ait organlar, lenf yumruları, lezyon kabukları, akciğer, dalak, karaciğer, beyin ve diğer tüm organlar antibiyotik ilave edilmiş Fizyolojik Tuzlu Su veya PBS içinde, soğuk zincir şartlarında gönderilmelidir. Gaita ve idrar vida kapaklı tüp/kaplarda gönderilmelidir.
4	Swab	Swab örnekleri kuruma olmaması için uygun taşıyıcı bir besiyeri içinde gönderilmelidir. Antibiyotik ilave edilmiş Fizyolojik Tuzlu Su veya PBS amaç için uygundur.
5	Vezikül sıvısı veya vücut sıvıları	Veziküllü lezyonlar ile abdominal veya organlardan alınan tüm sıvılar enfektörle çekilmeli, enfektör içinde veya başka bir steril kap içinde, soğuk zincir altında gönderilmelidir.
6	Süt	Süt numuneleri mastitisin ilk semptomları görüldükten sonra mümkün olan en kısa zamanda, her memeden ayrı ayrı steril tüplere yada kullanılmamış enjektöre (5-10 ml.lik) alınır. Soğuk zincir altında gönderilmelidir.
7	Yumurta	Yumurta, yumurta violü içerisinde, kırılmayacak şekilde ambalaj yapılarak gönderilir.

**Not: 1-Canlı veya henüz ölmüş hayvanlardan alınmalıdır. Dokuların tazeliğinin kaybolduğu durumlarda alınan örnekler ret edilecektir.**

**2- Tüm örnekler mümkün olan en kısa sürede, soğuk zincir (+4°C) şartlarında gönderilmelidir. Dondurulmuş örneklerin transport aşamasında çözülmemesi sağlanmalıdır.**

**3-Hayvanların yaş, ırk, cinsiyet ile sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir.**